

不让生命等候

Wondfo

## 2019-nCoV新型冠状病毒抗体检测试剂

(免疫层析法)

15分钟快速初筛新型冠状病毒  
操作简便，实现疾病早诊早治  
场景灵活，无需配套检测仪器  
早期轻症及无症状患者筛查



快速 经济 简便

Health

Wondfo®  
万孚

## 产品优势：IgM+IgG同时检测

新冠病人抗体IgM最早出现；随后出现IgG，每个病人两种抗体都会同时存在，病程不同阶段，个体不同，比例有差异。单独检测IgM或IgG一项容易出现漏检风险，分别检测增加检测频次，浪费资源。测总抗体可以确保不漏掉任何阶段的病人。

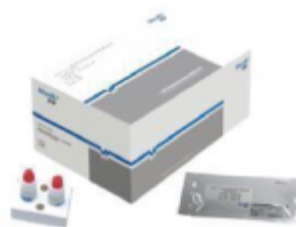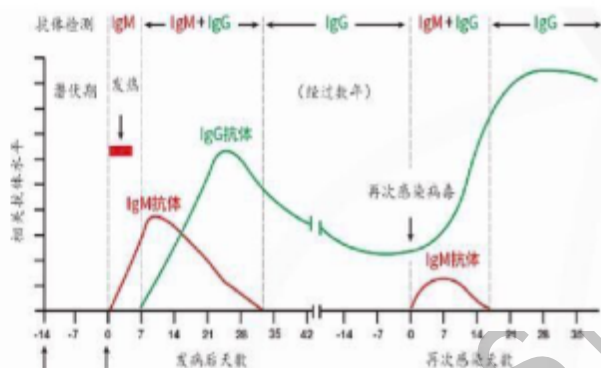


## 产品操作指导

检测样本：血清、血浆、全血

样本量：10UI (小孔)

稀释液量：80ul (大孔)

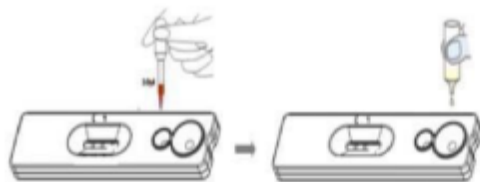


### ● 结果判读

阳性：表明患者感染新型冠状病毒

阴性：表明患者未感染或处于感染的极早期，建议



建议对有疑问的阴性结果采用核酸检测或病毒培养鉴定方法进行复核。

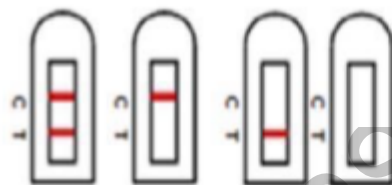

2019-nCoV阳性 2019-nCoV阴性

无效

抗体检查的意义：IgM抗体是体液免疫中最早出现的抗体，是近期感染的标志

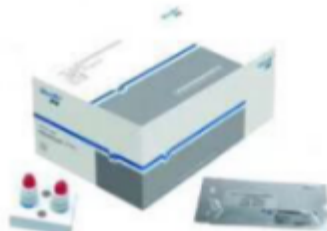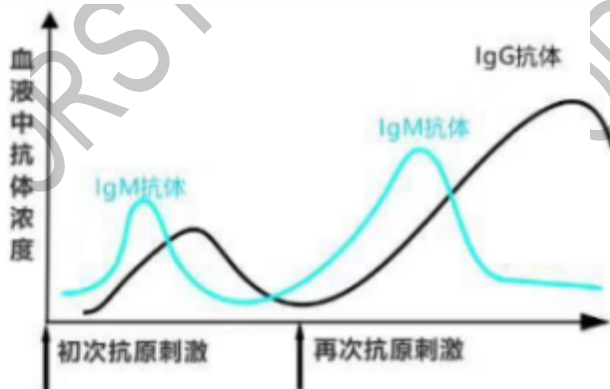

IgM抗体在病毒感染后最快一周可检测到，不同个体会有差异。

- (1) 检测结果阴性，表明患者未感染或处于疾病感染的极早期或恢复期；
- (2) 检测结果阳性，表明患者近期感染新型冠状病毒2019-nCoV。

## 订货信息

产品名称	规格	检测样本	储存条件	有效期
2019-nCoV新型冠状病毒抗体检测试剂	卡型 1人份/袋、1人份/盒、 10人份/盒、20人份/盒 25人份/盒、30人份/盒 40人份/盒、50人份/盒	全血、血清、血浆	2℃—30℃	24个月

本试剂用于体外定性检测人血清、血浆、全血样本中的2019新型冠状病毒抗体，适用于临床2019-nCoV新型冠状病毒感染者初筛

Wondfo 广州万孚生物技术股份有限公司  
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.

地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 邮编：510663 QQ：3482913832  
电话：020-32068829 13922496671 传真：020-32022032  
网址：www.wondfo.com.cn 产品咨询热线：800-999-4268、400-888-5268



FDA CE



FSC

请仔细阅读说明书  
关注最新产品资讯